

Jeisys
Better You




INTRAcel PRO™

A világ első mikrotűs RF készülékének evolúciója

INTRAc[®]el PRO™

A mikrotűs frakcionált RF technológia kitalálójától.

Ergonomikus (könnyebb, kézbe simuló) kezelőfej.
A nagy teljesítményű szolenoid motor a tűk gyors bőrbehatolását garantálja.

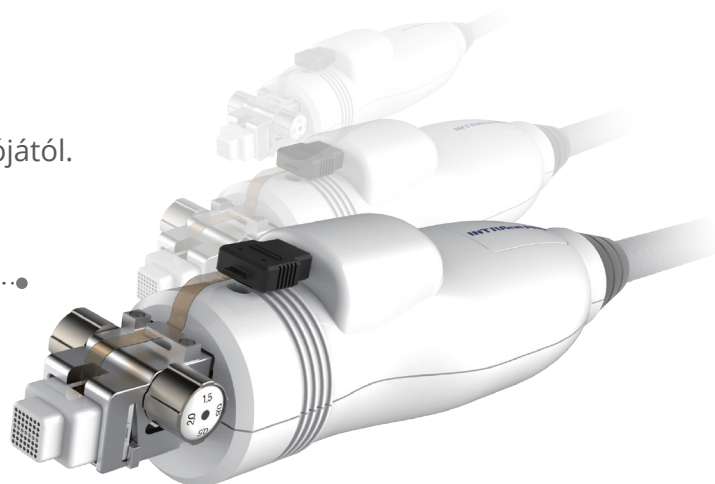

■ SRR, FRM & SRT™ tipek

Biztonságosabb, látványosabb és hosszantartóbb eredmények az SRR, FRM & SRT™ kezelőfejcsúcsok önálló és kombinált alkalmazásával.

SRR Tip


49 non-invazív elektróda



BIPOLÁRIS

Sérülés nélküli rejuvenáció
Periorbitális rejuvenáció


Epidermis

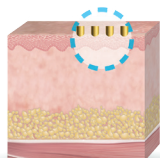

SRR

FRM Tip

49 szigetelt tű


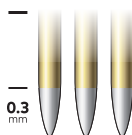


0.3 mm

MONO/ BIPOLÁRIS

Ráncok/ Tág pórusok/ Akne/
Finom vonalak / Hegek

Dermis

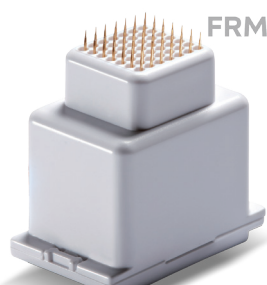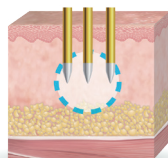

FRM

SRT™ Tip

16 nem szigetelt tű




BIPOLÁRIS

Szélesebb rétegben hat
Vörösség / Szeplők / Melasma

Epidermis

Dermis

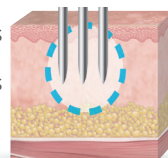

SRT™



„Csak helyi érzéstelenítést igényel, a kezelés után a bőr nem nedvezik, a vérzés nagyon kicsi, ha van egyáltalán, nincs bevérzés, de még nagyfokú ödéma sem. A 49 tűs elektródával az egész kezelés nagyon rövid, sok más terápiával összehasonlítva. A mikrotűs frakcionált rádiófrekvencia az Intracel készülékkel egy valódi „lunchtime” kezelés, egyértelmű előnyökkel a páciens számára, melyből az elfoglalt esztétikai szakemberek csak profitálhatnak.”


Klaus Fritz, M.D., Germany

■ INTRAcel PRO™ Melasma kezelés előnyei



■ Valós idejű MSR technológia (Bőr Rezisztencia Mérés – Measuring Skin Resistance)

A kezelendő területet a készülék először mérőárammal teszteli, mely valós idejű bőrrezisztenciát mér, majd a kalkulált energiaszükséglet alapján állítja be az optimális értéket.

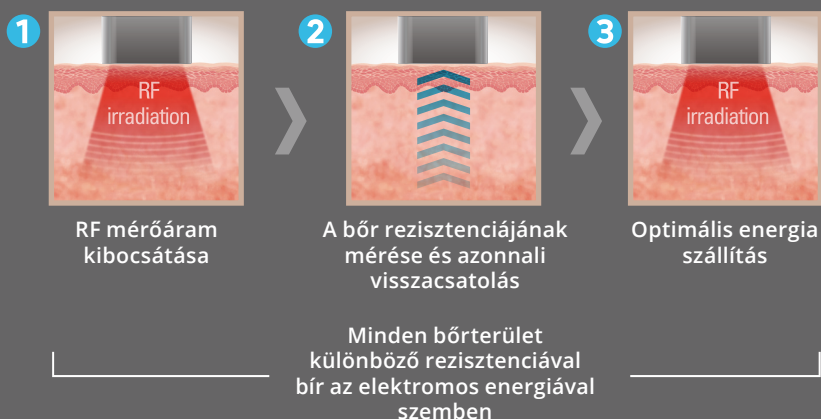


■ Előtte – utána




[Melasma]




[Vörösség és telangiektázia]

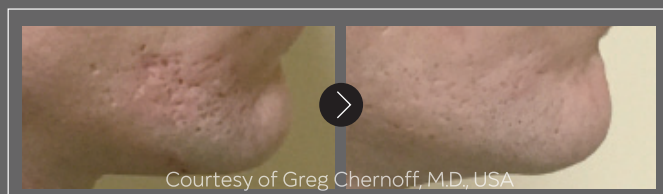


[Pattanás okozta jégcsákvány hegek]

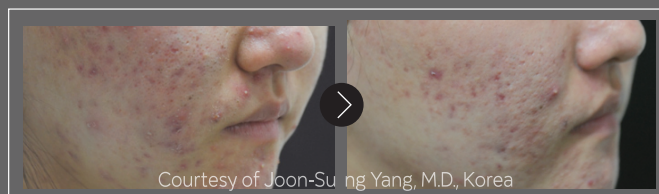

[Akne és aknés hegek]

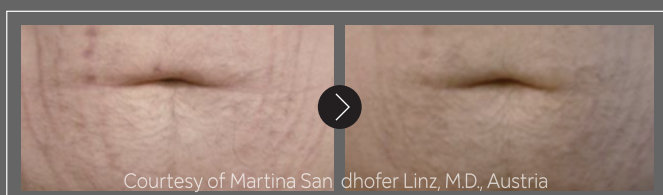

[Striák]

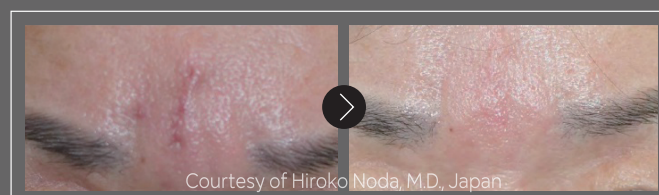

[Sérülésből visszamaradt heg]

INTRAcel PRO

Technikai specifikációk

RF típusa	Bipoláris/ Monopoláris
Energia	Max. 50 W
Frekvencia	1 MHz
Ismétlési ráta	0,2/ 0,5/ 1,0/ 2,0/ Egyesével
Kezelőfej	Szolenoid
Kezelőfej csúcs	Invazív 49 szigetelt mikrotűs tip (FRM) 16 nemszigetelt mikrotűs tip (SRT)
	Nem invazív 49 elektródás felszínes RF tip (SRR)
Tű vastagság	0,25 mm
Egyszerre kezelt terület	10 x 10 mm
Elérhető mélység	0,5/ 0,8/ 1,5/ 2,0 mm
Impulzus hossz	10 ms - 5,0 sec

Rendszer specifikációk

Tömeg	64 kg
Méret	350 mm (Sz) x 405 mm (H) x 1080 mm (M)



■ Vélemény

„A posztinflammatorikus hiperpigmentáció (PIH) alacsony incidenciája fontos igény a pigmentációra hajlamos, sötétebb bőrtípusok és az ázsiai populáció kezelése esetén. Ez egy megkülönböztetett előnyt jelent, hiszen megnöveli a lehetőségeinket, akár a lokális terápiákkal kombináltan is. Ilyen kreatív megoldásokat ismerhettem meg Ázsiában, ahonnan ez a technológia ered, s az első tapasztalataim alapján látom, hogy még számos új lehetőséget ígér.”

Michael H. Gold, M.D., USA

Jeisys
Better You



Dr Derm Equipment Kft.

H-1024 Budapest, Fény u. 2.

✉ ertekesites@drderm.net

☎ +36 70 428 3862

📘 Dr Derm Equipment

🌐 www.drderm.net

📷 [drdermequipment](https://www.instagram.com/drdermequipment)