

Z
lipo



ideális testkontúr

érezd a különbséget



A mi tapasztalatunk az Ön sikeréért



Zimmer MedizinSysteme: kompetencia a krioterápiában, Németor- szágból

A németországi Neu-Ulm városában működő Zimmer MedizinSysteme 50 év tapasztalatával rendelkezik és az egész világon piacvezető a hideg levegő orvosi célú felhasználásában. Hatalmas ismeretanyagát az eladott több mint 45 000 darab Cryo5 és Cryo6 hideglevegős bőrhűtő rendszernek és az innovatív jéglabornak köszönheti. Ezekből építkezve fejlesztette ki a Zimmer MedizinSysteme az új *Z Lipo Cryolipolysis™* rendszert.





Küldj egy hideg üzenetet a zsírdepóknak




Élvonalbeli technológia

A Cryolipolysis™ innovatív módszerét alkalmazó *Z Lipo* készülékkel lehetőség nyílik a zsírlerek célzott és tartós csökkentésére, non-invazív módon. A kezelés során a megcélzott zsírszövetet hosszabb időn keresztül, ellenőrzött és biztonságosan, alacsony hőmérsékletre hűtjük.

Tudományos közlemények igazolták, hogy az eredmények szignifikánsan jobbak, amennyiben ezt a kezelést a Zimmer MedizinSysteme *Z Wave* lökéshullám terápiás készülékével együtt alkalmazzák.

Z Lipo – hatásos és egyszerű

A *Z Lipo* mindenkit meggyőző egyszerű, biztonságos és felhasználóbarát működésével. A változatos kezelőfej méretek minden testrégióhoz optimálisan alkalmazkodnak. Az individuális kezelési protokollok minden páciens egyedi igényéhez alkalmazkodó kezelést tesznek lehetővé.

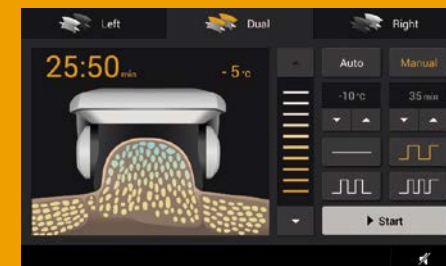


Z Lipo kezelési lépések

A Z Lipo kezelés fázisai a legfrissebb kutatási eredmények alapján lettek kidolgozva, mely jelentős sikereket vetít előre a fagyasztással történő zsírdepó csökkentésben.


1. A Cryolipolysis™ megkezdése

A kezelőfejet elhelyezzük a kiválasztott területen és megkezdődik a lehűtés.

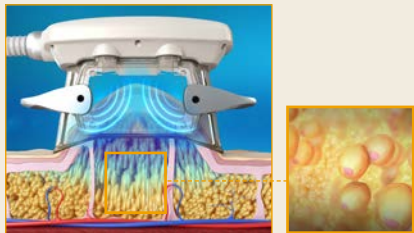


2. Azonnali reakció

A kezelt terület zsírsejtjei reagálnak a lehűtésre.

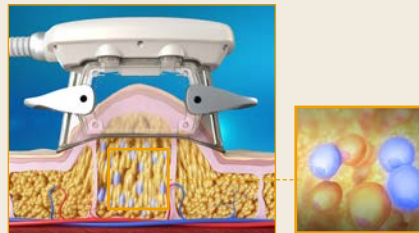


3. A zsírsejtek eliminálása

A kezelt zsírsejtek természetes úton távoznak.

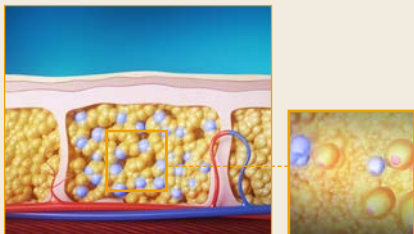

4. Az eredmény

8-12 hét múlva láthatóvá válik az eredmény.

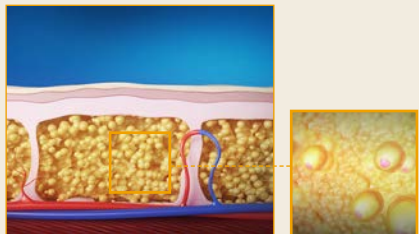

Rugalmas és biztonságos – az elégedett vendég garantált

A Z Lipo rendszer kezelőfejei 4 különböző méretben kaphatók a fájdalommentes szívóhatás biztosítása érdekében. A kezelőfej által biztosított precíz ellenőrzőrendszernek köszönhetően a kezelendő terület mindig a kívánt hőmérsékletre lesz lehűtve. Az optimális hőmérséklet stabil fenntartása a kezelés sikerének és biztonságos végrehajtásának alapvető feltétele.

A pulzáló szívóhatás lehetősége fokozza a nyirokrendszerre és az anyagcserére kifejtett pozitív hatást. A vákuum erőssége 10 fokozatban állítható, s a kezelés közben is van lehetőség annak módosítására.


Cryolipolysis™ - Hogyan működik?

A Cryolipolysis™ a zsírdepókat célozza meg, hosszú időn keresztül (általában 60 percig), ellenőrzött módon lehűtve azokat.


A célzott hidegkezelés okozta energiavesztés a zsírsejtek apoptózisát okozza, mely végül pusztulásukhoz vezet. A teljes lebomlás és a zsírsejtek természetes úton - a nyirokrendszerrel történő – eltávolítása kb. 10-12 hetet vesz igénybe. Annak köszönhetően, hogy a környező szövetek nem reagálnak úgy a lehűtésre, mint a zsírsejtek, a kezelés biztonságos, kíméletes és non-invazív.

A bőrfelület károsodását elkerülendő, egy speciális, egyszer használatos, nedves szövetlapot helyezünk a kezelőfej alá.

Kezelési eredmények:

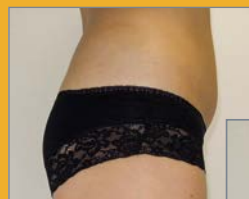

kezelés előtt

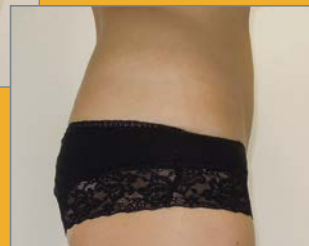

8 héttel a kezelés után



kezelés előtt



8 héttel a kezelés után

Kezelhető területek:

- has
- csípő
- derék
- hát
- férfi mell
- külső és belső comb
- felkar
- fenék
- toka



Z Lipo – hűsölve pihensz
a megálmodott alakért





***Z Lipo*, a legújabb technológia és a modern design ötvözte**

Ahogy a krioterápiás megoldások vezető világszereplőjétől elvárhatja, a *Z Lipo* készülék a legújabb fejlesztéseken és technológiákon alapul. A magasfokú funkcionalitás és a korszerű design az innovatív felhasználás minden igényét kielégíti. A készülék két oldalán elhelyezett kezelőfej-tartók kényelmes hozzáférést biztosítanak. A *Z Lipo* tetején található tárolóhely tökéletes a tartozékok számára. A kifinomult formatervnek köszönhetően a készülék bármely testfelszín kezeléséhez tökéletesen alkalmazkodik.

Könnyen és gyorsan

A *Z Lipo* készülék korszerű szoftvere a lehetőségek teljes skáláját kínálja az egyedi kezelések megvalósításához. A nagy, 10,2"-os színes érintőképernyő segítségével a felhasználó biztonságosan és a szoftver által segítve intuitív módon megváltoztathatja az alkalmazás időtartamát, a vákuumszívás erősségét (10 fokozatban) és módját (pulzáló vagy folyamatos). A kiválasztott paraméterek egyértelműen láthatók a kijelzőn a kezelés során. Az alapértelmezett programokon kívül a felhasználó saját beállításokat is elmenthet. Individuálisan megadott kezelési hőmérséklet, folyamatos vagy pulzáló szívóhatás, a *Z Lipo*-val minden lehetséges.




Z Lipo – a design és a funkció találkozása



Z Lipo – erősségek

- modern készülék formaterv
- alacsony kezelésenkénti költség
- a két kezelőfej egyidejű használata is lehetséges
- felhasználóbarát, egyénileg beállítható szoftver
- 10,2"-os színes érintőképernyő
- állítható hőmérséklettartomány 5-10C fok között
- folyamatos vagy pulzáló vákuum
- 10 fokozatban állítható szíváserősség
- akár 3 kezelési szakasz különböző paraméterekkel egy alkalmazásban
- szabadon megválasztható kezelési idő (max. 60 perc)
- a kezelés a kezelőfejen elhelyezett nyomógombokkal indítható

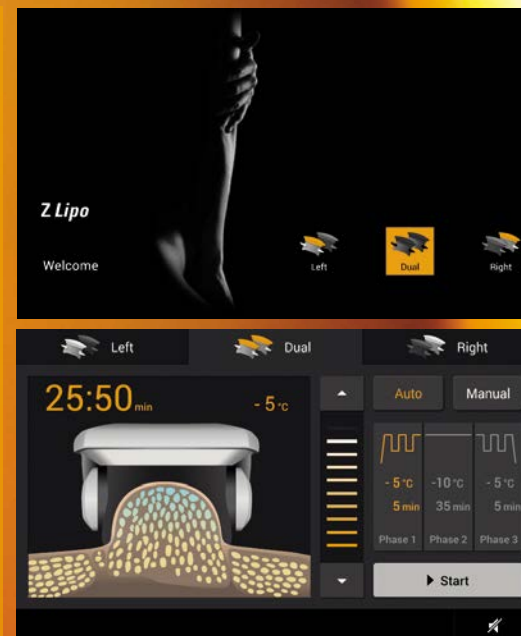

Z Lipo & Z Wave^{PRO} a „cool” kombináció

Légy sikeresebb!

A Z Lipo & Z Wave^{PRO} (CryolipolysisTM és lökéshullámok) együttes alkalmazásával a tökéletes kombinált kezelést kínáljuk a nemkívánatos zsírfelhalmazódás szignifikáns csökkentésére.

Vizsgálatokkal igazolták és közleményekben publikálták, hogy az intenzív, fájdalommentes lökéshullám terápia a CryolipolysisTM után nemcsak jobb zsírcsökkenést eredményez, hanem segíti a nyirokelvezetést és feszesíti a bőrt.


Két készülék, egy koncepció

A páciensek egyre kritikusabbá válnak és egyre felkészültebbek egy kezelési ajánlat elfogadása előtt. Ennél fogva a korszerű praxis számára elengedhetetlenül fontos, hogy nemcsak személyre szabható lehetőségeket kínáljon, hanem törekedjen a minél teljesebb kezelési koncepció megvalósítására. A Z Lipo & Z Wave^{PRO} koncepció alkalmazásával új vendégeket is megnyerhetünk.

Vezető klinikák a világ számos pontján alkalmazzák a Zimmer MedizinSysteme sikeres koncepcióját.



CryolipolysisTM versus CryolipolysisTM és Z Wave

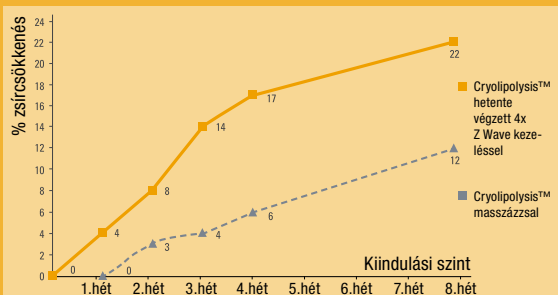

Dr. Jeffrey A. Hunt tanulmányából

Kézi masszázs és a Z Wave^{PRO} hatásának különbsége



Dr John Shieh, South Pasadena, USA jóvoltából

Rugalmasság a praxis részére

A Z Wave^{PRO} önmagában is sikeres a narancsbőr és a kötőszöveti gyengeség kezelésében, valamint az általános bőrfeszítésben.

A Z Wave^{PRO}-t eredményesen alkalmazzák CryolipolysisTM, rádiófrekvencia, ultrahang és szoft lézer kezelésekkkel kombináltan. Jó eredmények mutatkoznak a hegek és a striák kezelésében is.





Műszaki adatok



Technológia	Cryolipolysis™ - alacsony hőmérsékletű üreges kezelőfejek vákuummal
Kezelőprogramok	Standard beállítások és szabadon változtatható paraméterek
Kijelző	10,2" színes érintőképernyő
Kezelőfejek	XS (toka), S, M, L méretben (alapfelszereltségben 2db M-es méretű)
Szívóhatás	10 fokozatban, 250 Hgmm-ig
Frissítések	szoftverfrissítés és szervíz USB porton keresztül
Tápfeszültség	240 V, 50/60 Hz Az alacsonyfeszültségű 2006/95/EC direktívának megfelelően
Védelmi osztály	I
Méretek	szélesség: 665mm, mélység: 629 mm, magasság: 1082 mm
Tömeg	kb. 84 kg (kezelőfejekkel)